


# Как можно очистить носик малыша при насморке

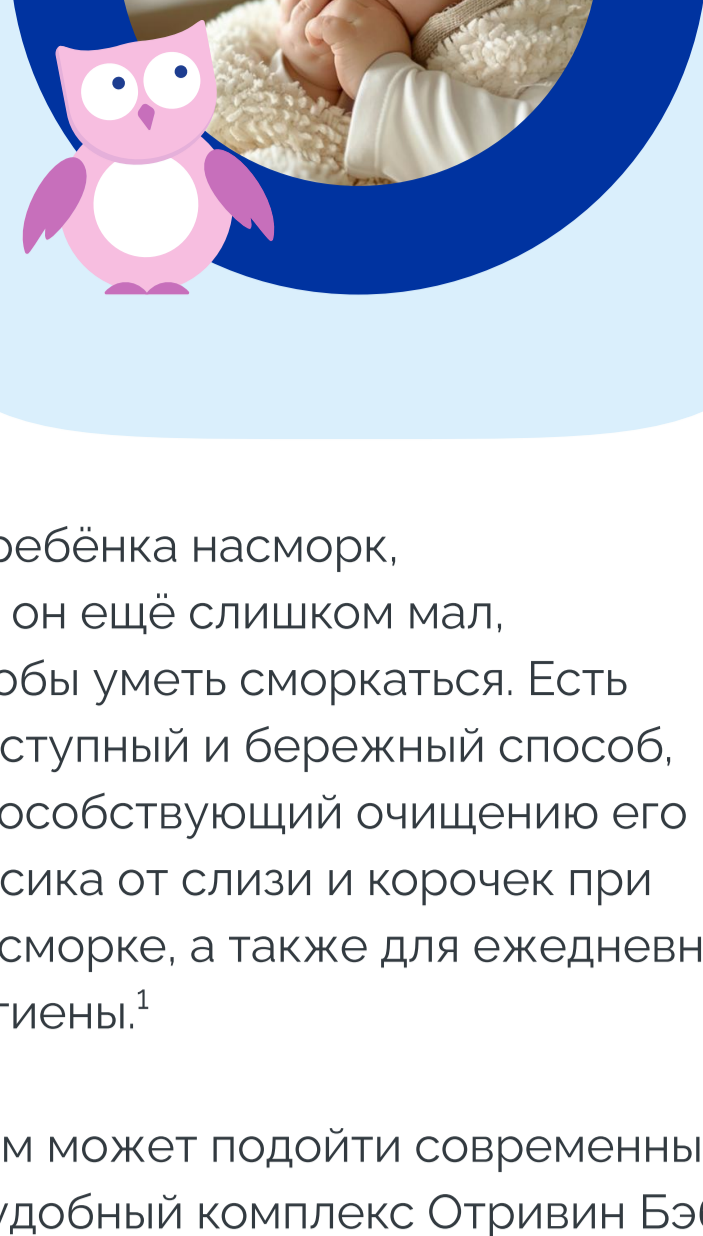


У ребёнка насморк, но он ещё слишком мал, чтобы уметь сморкаться. Есть доступный и бережный способ, способствующий очищению его носика от слизи и корочек при насморке, а также для ежедневной гигиены.<sup>1</sup>


Вам может подойти современный и удобный комплекс Отривин Бэби: **детский аспиратор Отривин Бэби Комфорт**, раствор для орошения полости носа и конечно же мамина забота.




1. Уложите малыша на спинку, поверните его голову на бок.

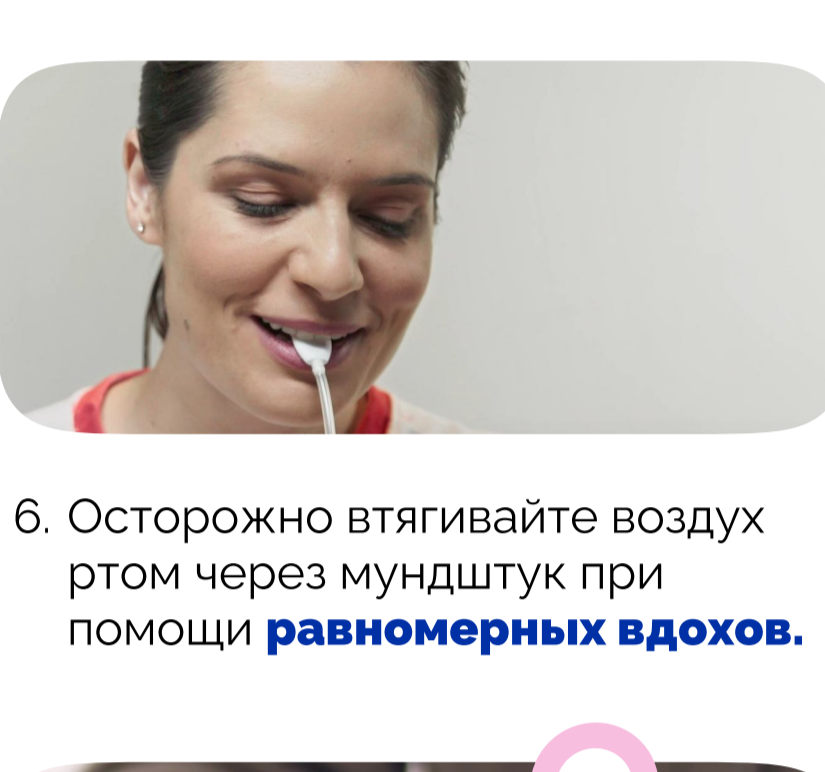

2. Закапайте в ноздрю стерильный физиологический раствор, например, **капли Отривин Бэби**. Подождите пару минут.

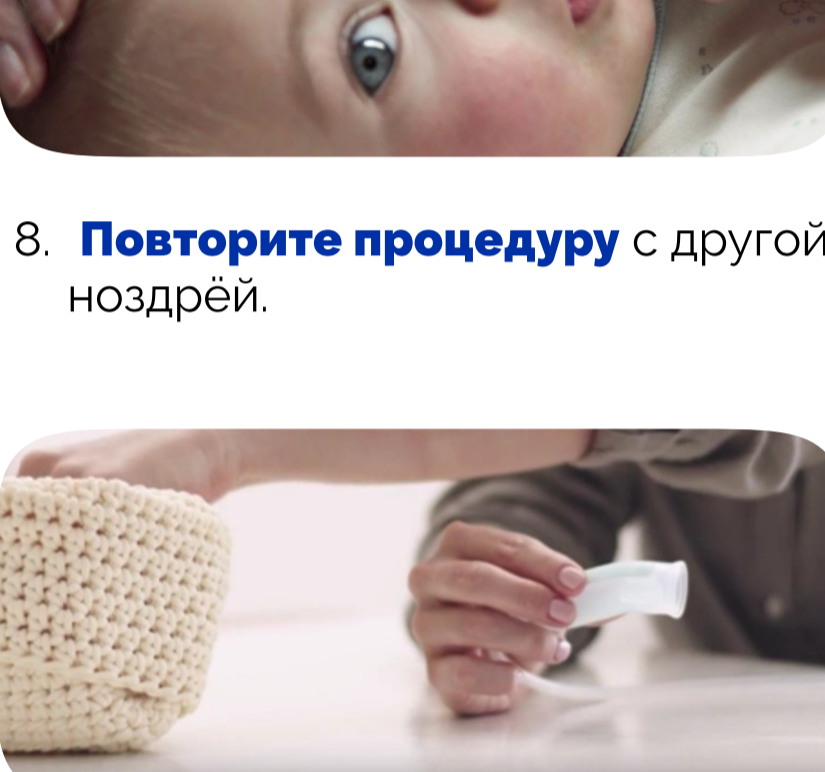

3. Присоедините **сменную насадку с фильтром** к корпусу аспиратора.

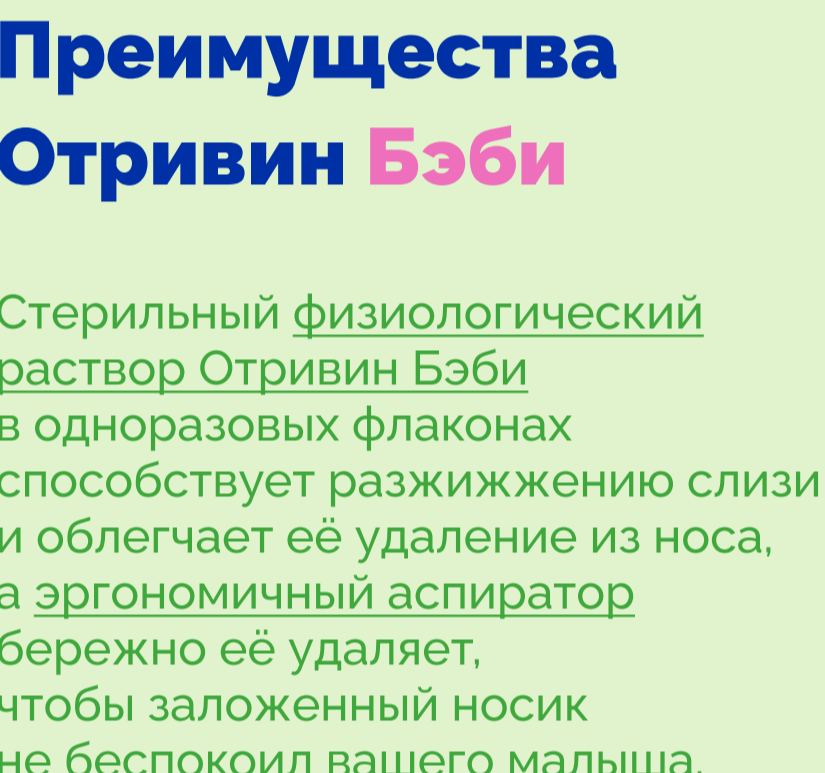

4. Вставьте **мягкий наконечник** в ноздрю ребёнка (вторую ноздрю не закрывайте).




5. Возьмите **мундштук** в рот.



6. Осторожно втягивайте воздух ртом через мундштук при помощи **равномерных вдохов**.



7. Если **насадка-фильтр** уже заполнилась выделениями, а нос ещё не очищен — смените её на новую.

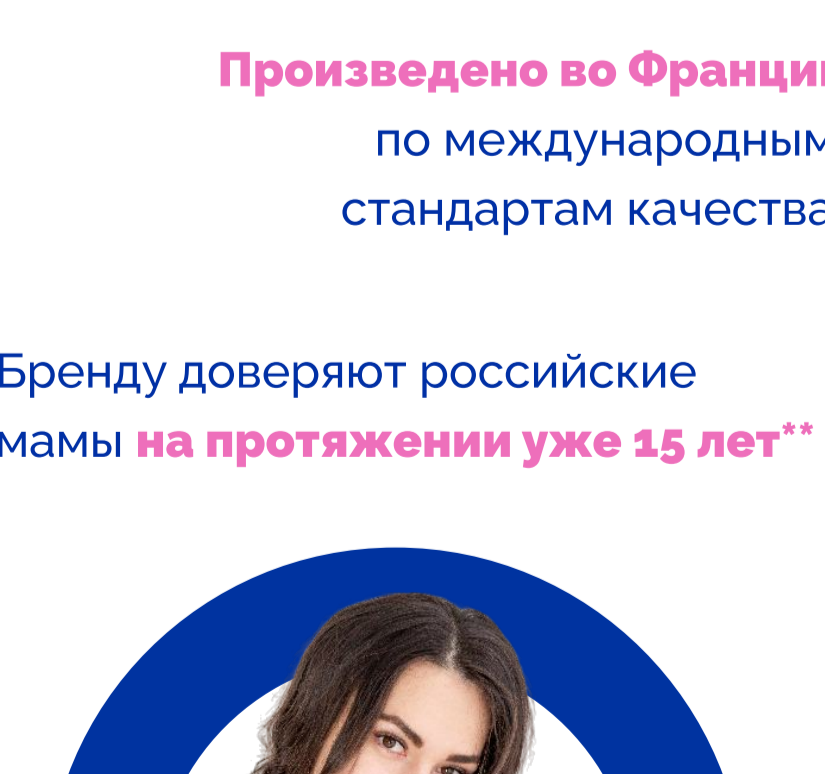

8. **Повторите процедуру** с другой ноздрей.



9. Снимите и **выкиньте использованную насадку**. При следующей процедуре используйте новую.




## Преимущества Отривин Бэби

Стерильный **физиологический раствор Отривин Бэби** в одноразовых флаконах способствует разжижению слизи и облегчает её удаление из носа, а **эргономичный аспиратор бережно её удаляет**, чтобы заложенный носик не беспокоил вашего малыша.

**Промывать носик** таким способом при насморке можно так часто, как это потребуется, чтобы освободить его от слизи.<sup>2</sup>




Современный эргономичный аспиратор Отривин Бэби Комфорт рекомендован специалистами,<sup>3</sup> подходит для бережного очищения носиков с самого рождения.<sup>1</sup>

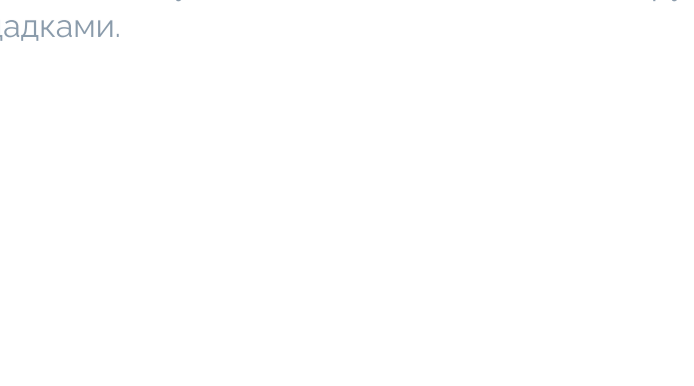


**Отривин Бэби Комфорт**

[Купить](#)

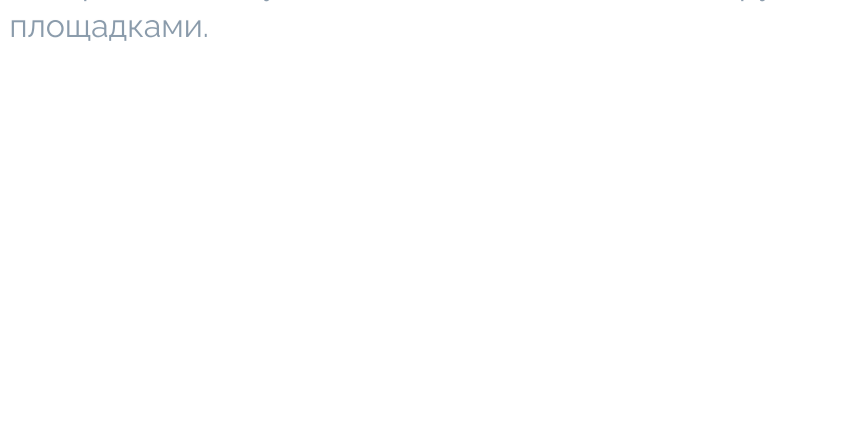

**Эргономичная форма** для удобного использования

Одноразовые мягкие **сменные насадки** не требуют дезинфекции

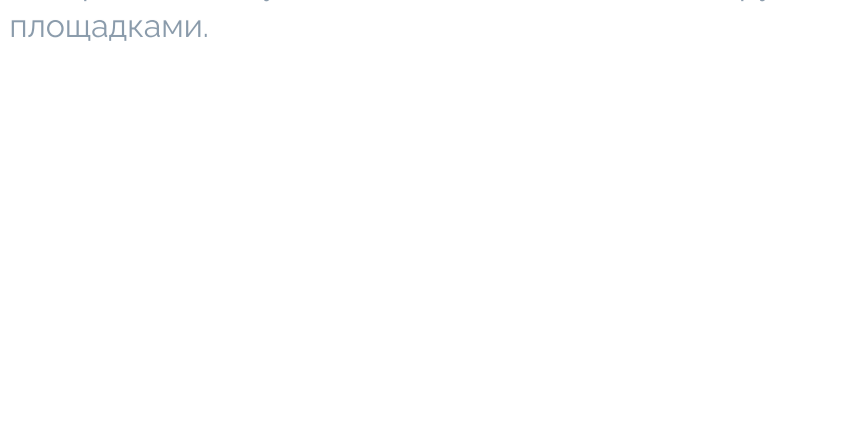


Контролируемый **процесс аспирации** с помощью дыхания мамы

**Абсорбирующий фильтр** задерживает слизистые выделения внутри насадки и предотвращает заражение мамы при очищении носа ребёнка


**Пластиковый кейс** для гигиеничного хранения — удобно брать с собой

**Запасные насадки** в индивидуальной упаковке продаются отдельно

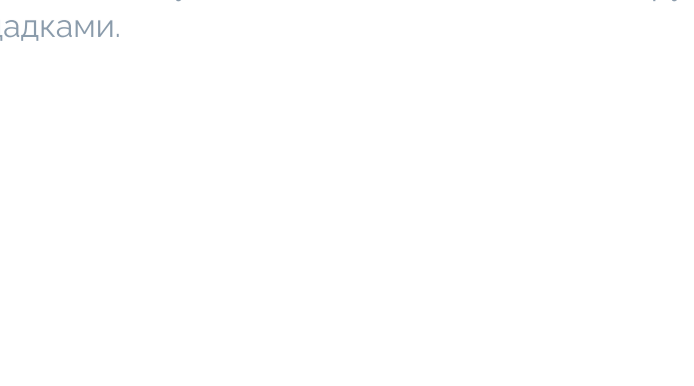

**Произведено во Франции** по международным стандартам качества\*

Бренду доверяют российские мамы **на протяжении уже 15 лет\*\***

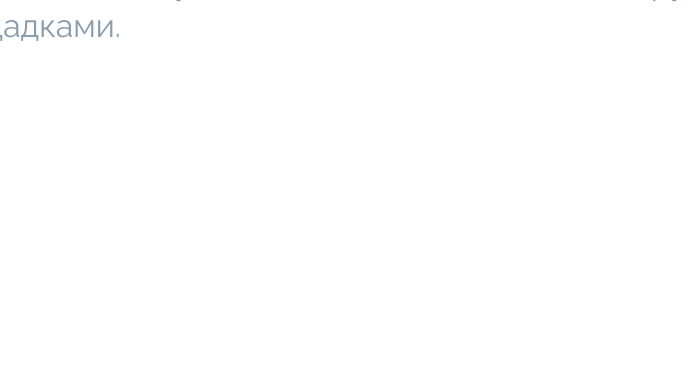

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Приведенную информацию нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. Обратитесь к профильному специалисту.

При использовании у детей до 1 года следует консультироваться с врачом.

\*GMP сертификация.

\*\*Государственный реестр медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий, начиная с 2008 года.

<sup>1</sup> ИМН Отривин Бэби Комфорт аспиратор назальный ФСЗ 2008/01133 от 05.05.2022.

<sup>2</sup> Инструкция по применению медицинского изделия Отривин Бэби капли для орошения полости носа в одноразовых флаконах-капельницах. РУ № ФСЗ 2008/02184 от 06.07.2022.

<sup>3</sup> При остром назофарингите. Согласно данным программного обеспечения "ФармМонитор 360" тза период с 01.01.21 по 31.03.23 в отношении бренда "Отривин Бэби", ООО "АйДи-360".

OZON — ООО «Интернет Решения» ОГРН 1027739244741 ИНН 7704217370. 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, Помещение I, эт. 41, комн. 6. Не является рекламой интернет-площадки OZON. Для совершения покупки можно воспользоваться другими площадками.